



## SAGE UNTREATED SUCTION TOOTHBRUSH

### SISTEMA DE CEPILLO DE DIENTES CON SUCCIÓN SIN TRATAMIENTO

(Se conecta directamente a las líneas de succión estándar)

#### FICHA TÉCNICA

(Información tomada del fabricante)

**INVIMA 2022DM-0025874**

**(VENCE 22/08/2032)**

Los sistemas y productos de succión ayudan a tratar a los pacientes no ventilados con riesgo de neumonía adquirida en el hospital (HAP). Las herramientas se conectan fácilmente a las líneas de succión estándar y ayudan a eliminar la placa, los residuos y las secreciones orales. El puerto para pulgar fácil de usar proporciona el control de succión fácil, cambios de instrumento rápidos y se une a líneas de succión estándar.

Los sistemas de succión TOOTHETTE® para el cuidado bucal abordan los factores de riesgo de las neumonías nosocomiales. Los sistemas de succión son sistemas integrales de higiene oral que ayudan a eliminar la biopelícula y las secreciones orales, ayudan a eliminar los residuos, la flema y el moco. Limpia mecánicamente, refresca y desodoriza la cavidad bucal.



#### CARACTERÍSTICAS

Cada cepillo de dientes con succión tiene 4.000 cerdas o “puntos de contacto” para eliminar eficazmente la placa dental.

Los sistemas de succión son para pacientes con riesgo de neumonía por aspiración. El puerto para pulgar proporciona un fácil control de succión. Los cepillos de succión ayudan a eliminar la placa dental, los desechos y las secreciones orales, todos ellos factores que se ha comprobado albergan patógenos respiratorios potenciales.

#### CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Dispositivo medico Riesgo I



## COMPONENTES

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tubo hueco rígido	Polipropileno
Cabeza con cerdas	Nylon
Almohadilla	Poliéster - Poliuretano
Puerto de succión	Polipropileno

## MODO DE USO

Abra el paquete, extraiga el cepillo de dientes y conéctelo al tubo de succión. Humedezca si así lo desea. Limpie la boca durante 1 minuto. Para succionar sitúe el pulgar sobre la abertura. Deseche el cepillo de dientes.

## ADVERTENCIAS

No permita al paciente que muerda el cepillo de dientes de succión. Tener especial precaución con los niños y con las personas que no colaboran.

## PRESENTACION

Empaque por 1 cepillo de dientes de succión.

## ELIMINACION

Para realizar el desecho del Dispositivo Médicos se puede aplicar lo dispuesto en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA.

La disposición final de estos dispositivos médicos debe cumplir con las políticas de Manejo y Destrucción de la institución de salud en donde se esté utilizando.

## FABRICANTE

Sage Products LLC. - USA

## IMPORTADOR

Comfort Products Colombia S.A.S